



FICHA TÉCNICA:

Protector para Juanete con Funda



INDICACIONES:

Indicado para separar y corregir la posición de los dedos, aliviando la presión del juanete.

INSTRUCCIONES DE USO:

Colocar el anillo entre los dedos de los pies, utilizando según sea necesario.

MATERIAL:

Tela elástica y Gel TPE

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Lavar con agua fría y jabón suave. Secar al aire o con paño. No exponer a altas temperaturas. Usar talco en el gel. Mantener libre de residuos.

TALLES:

NXT017-S
NXT017-L

UNIDADES:

Par (2)